

# MEMOplanner Go v1.2

## Nyheter



# Nyheter i MEMOplanner Go v1.2

Appen har nå flere funksjoner fra MEMOplanner, for å gi støtte «on the go»:


1. Tilpassede alarmsignaler
2. Ukekalender
3. Månedskalender
4. Analog klokke i datofeltet
5. Flere innstillinger i «øyet»
6. Advarsler når du legger inn aktivitet
7. Tilpasset datovalgvisning



# Tilpassede alarmsignaler

Med nye alarminnstillinger kan meldingene nå gjøres tydeligere. Merk at alarmen på iPhone kan være maksimalt 30 sekunder.

Alarminnstillingene i appen synkroniseres ikke med MEMOplanner.

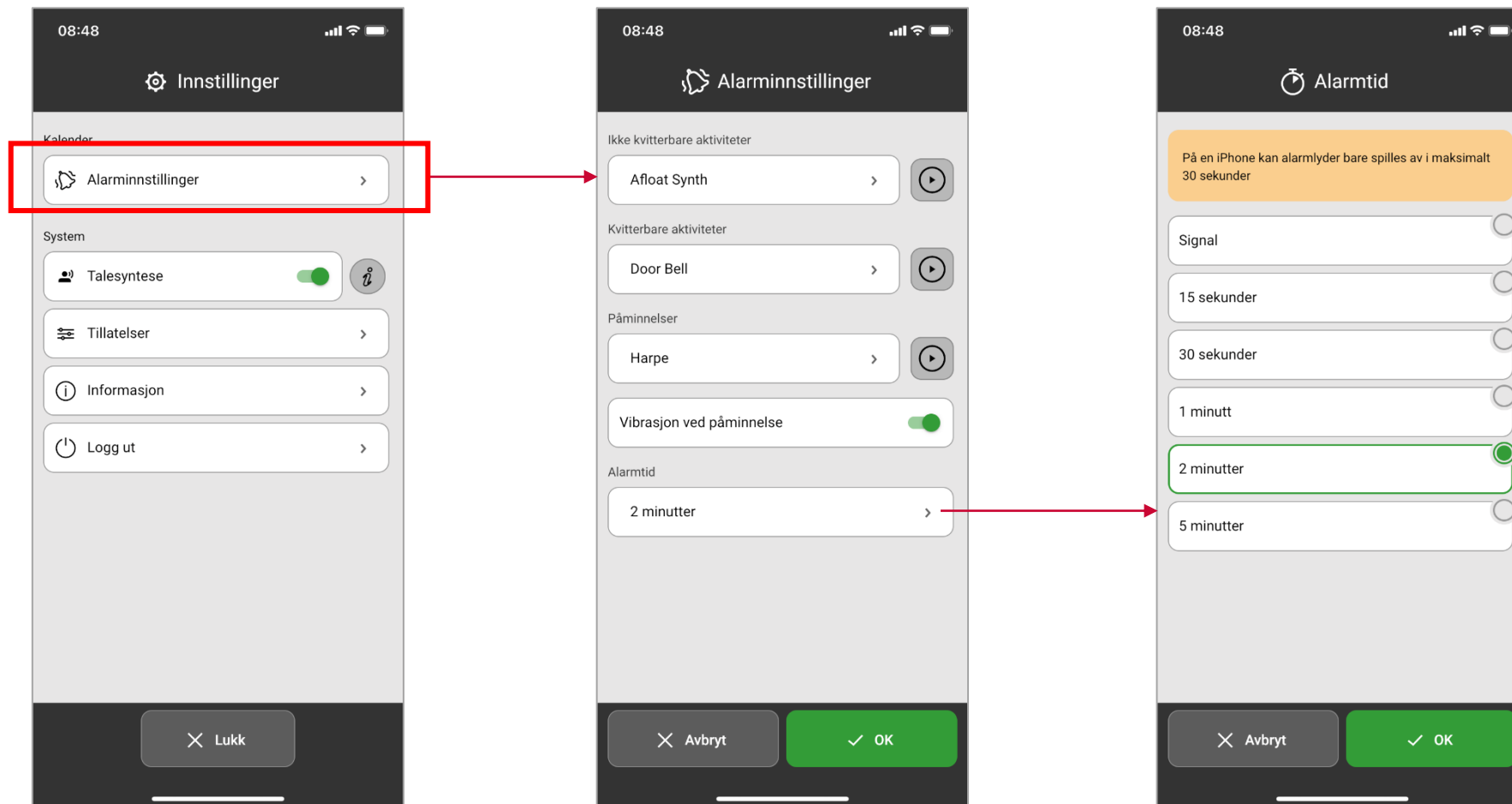





# Ukekalender og Månedskalender

Nå inneholder appen også en ukentlig visning og en månedlig visning.


*Dagkalender*

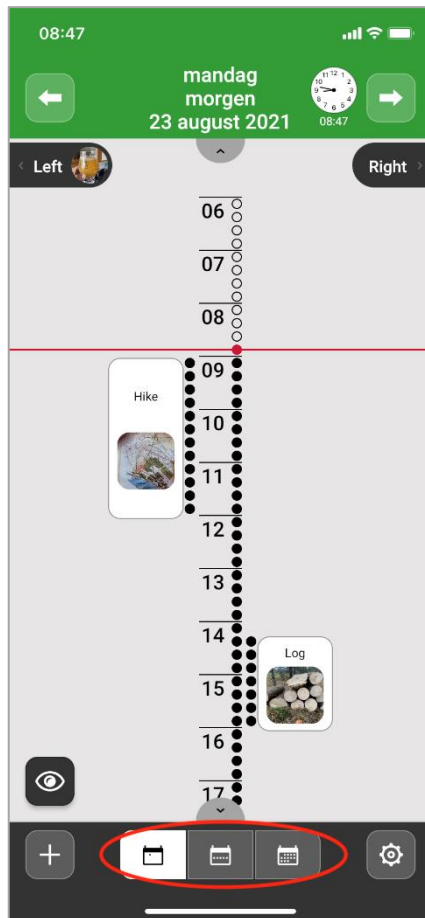

*Ukekalender*

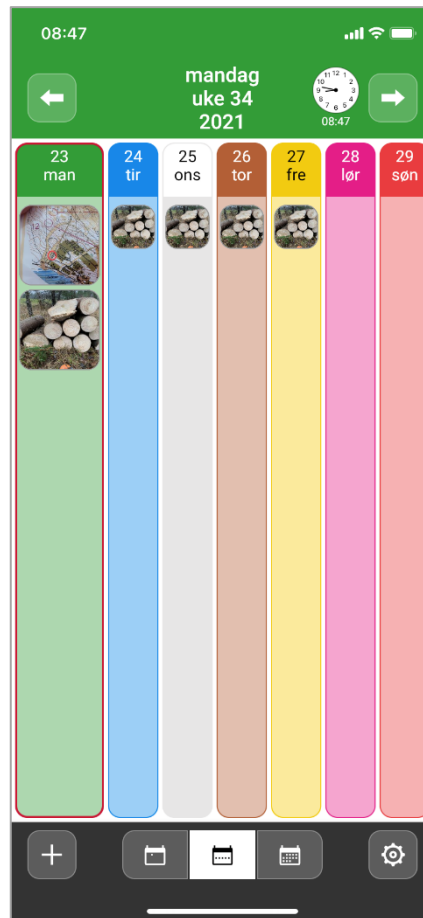


*Månedskalender*

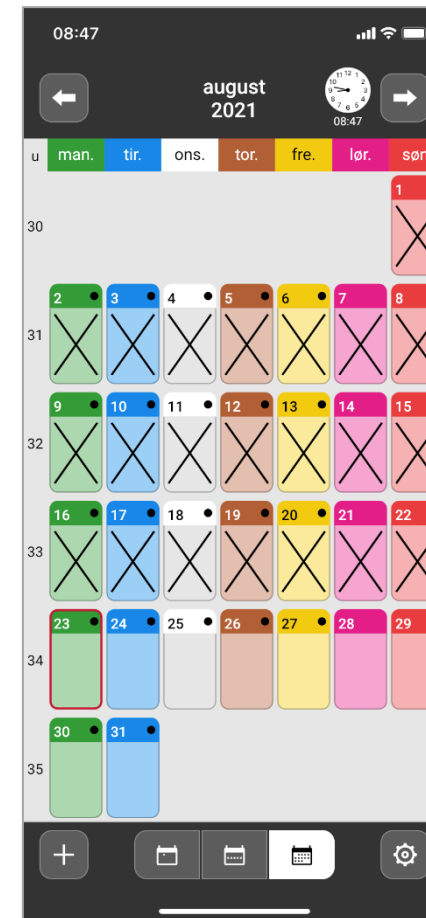

# Analog klokke

Det er nå mulig å vise en analog klokke i datofeltet. Ved å trykke på klokken får du avlest tiden\*.  
Innstillingen av analog og / eller digital klokke gjøres i MEMOplanner.

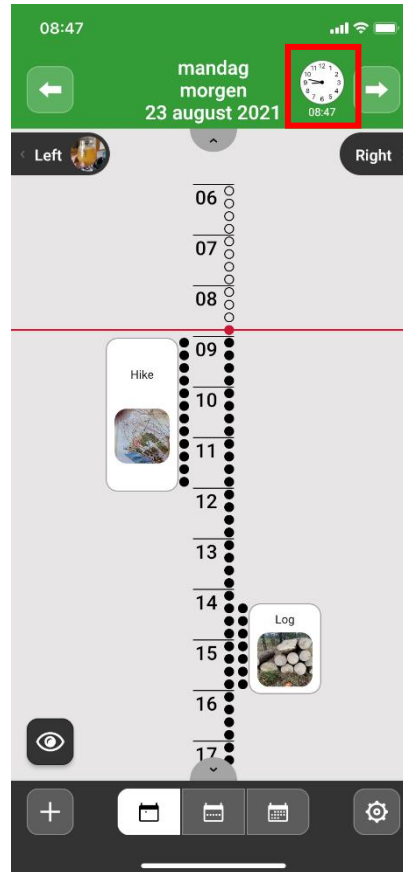


*\*Tiden blir lest opp "ti og førti-seks", ikke "kvart på elleve". Dette vil bli fikset i en senere oppdatering.*

# Flere innstillinger i «øyet»



Nå kan du stille inn tidskolonneintervallet og zoome via «øyet» i appen.

For første gang viser appen innstillingene som er gjort i MEMOplanner. Deretter kan du gjøre lokale innstillinger i appen, som ikke synkroniseres med MEMOplanner.

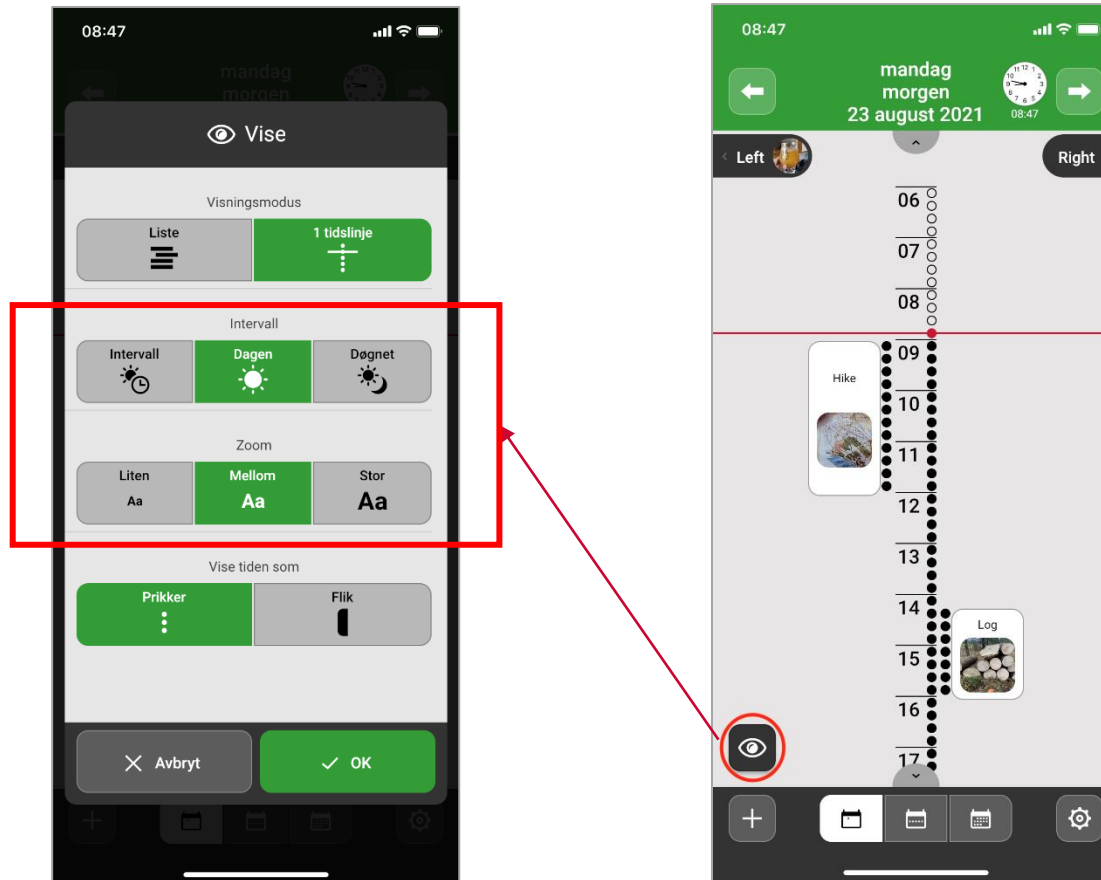

# Advarsler når du legger inn aktivitet

En advarsel vises nå hvis den opprettede aktiviteten er i konflikt med den eksisterende aktiviteten eller hvis aktivitetstiden allerede har passert. (Samme som i MEMOplanner.)

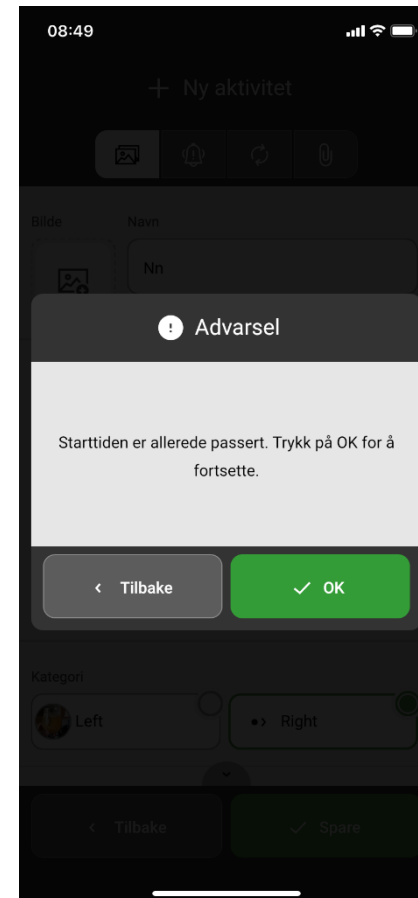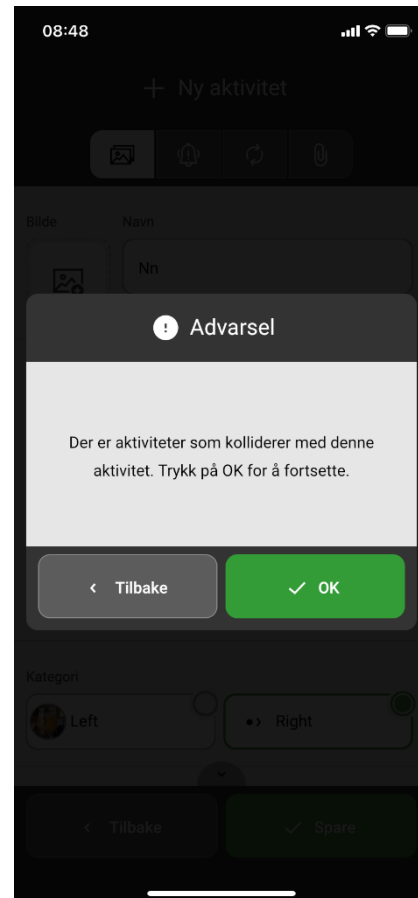

# Tilpasset datovalgvisning

Når du velger dato for en aktivitet, vises nå en tilpasset datovalgvisning. (Samme som i MEMOplanner.)

