

MEMOplanner Go v1.2

Nyheter

Nyheter i MEMOplanner Go v1.2

Appen har nu ytterligare funktioner från MEMOplanner, för att ge stöd "on the go":


1. Anpassade larmsignaler
2. Veckovy
3. Månadsvy
4. Analog klocka i datumfältet
5. Fler inställningar i "ögat"
6. Varningar vid inläggning av aktivitet
7. Anpassad vy för val av datum



Anpassade larmsignaler


Med nya larminställningar kan nu notiserna göras tydligare. OBS att larmljud på iPhone är begränsat till max 30 sekunder.

De larminställningar som görs i appen synkroniseras inte med MEMOplaner.

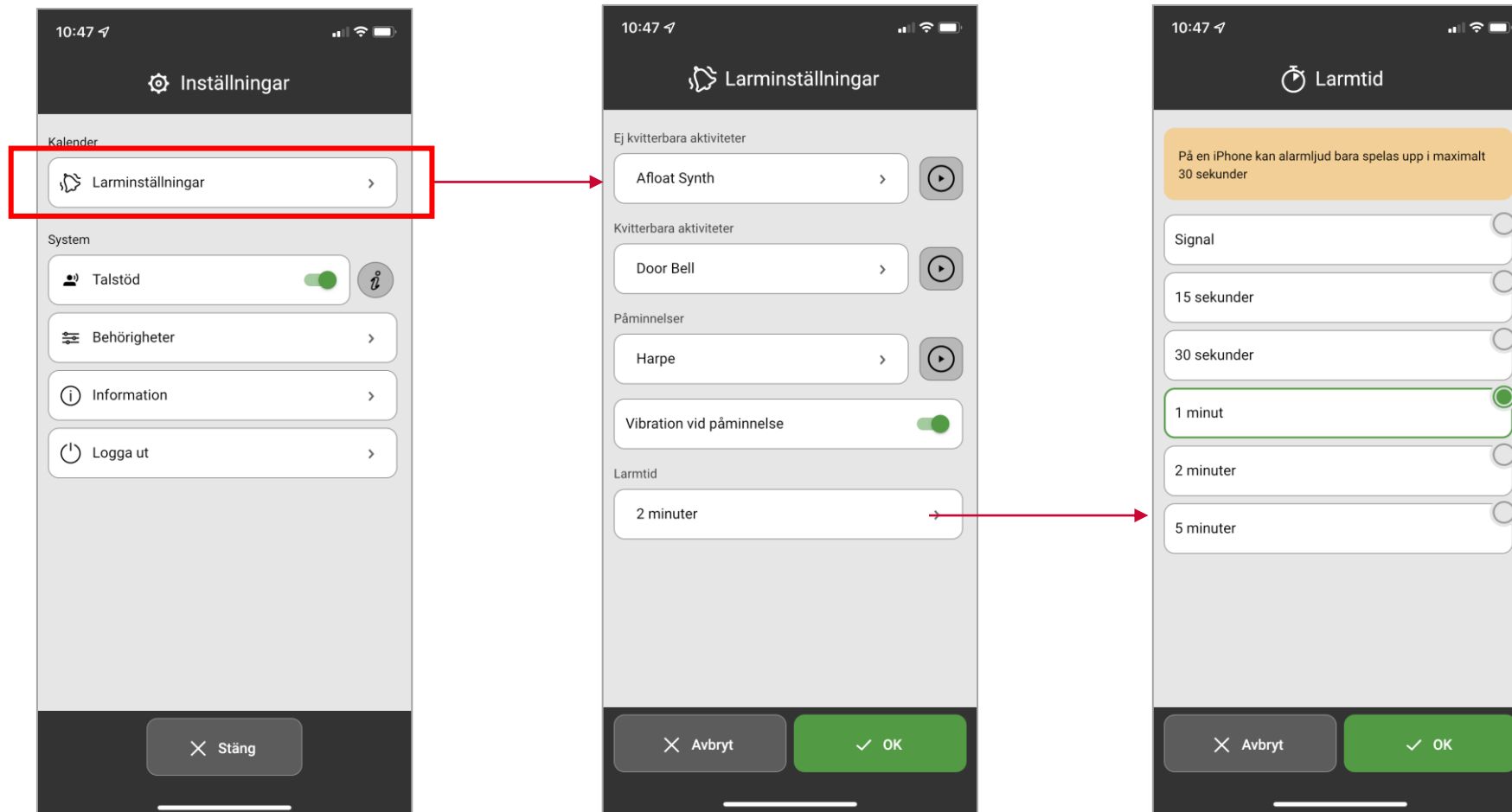


Veckovy och Månadsvy

Nu innehåller appen även veckovy och månadsvy.

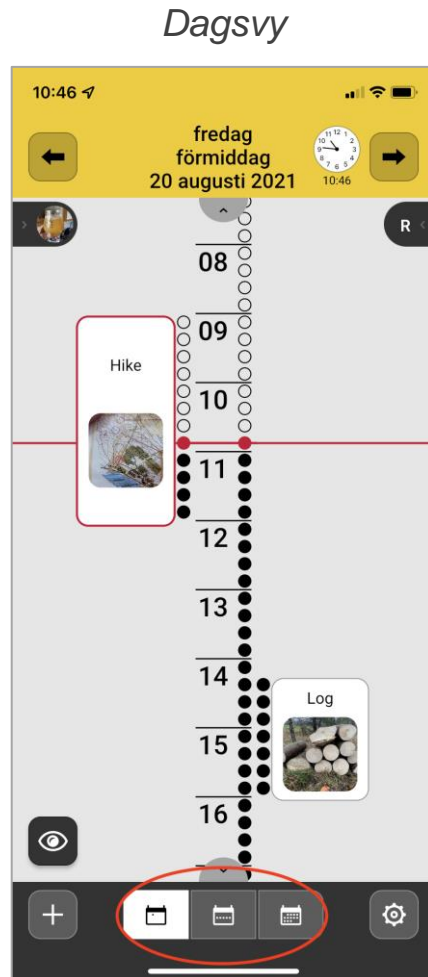

Analog klocka

Nu finns möjlighet att visa en analog klocka i datumfältet. Genom att trycka på klockan får man tiden uppläst*. Inställningen av analog och/eller digital klocka görs i MEMOplaner.

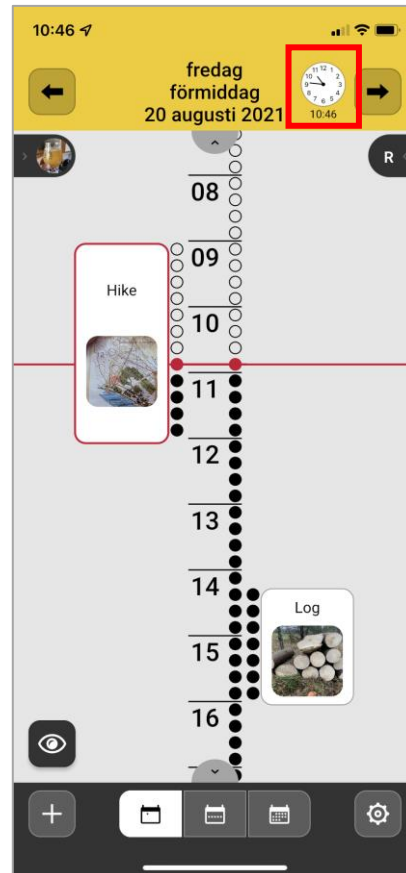


**Tiden läses upp "tio och fyrtiosex", inte "kvart i elva". Detta kommer att åtgärdas i senare uppdatering.*

Fler inställningar i "ögat"



Nu kan man ställa in tidpelarens intervall och zoom via "ögat" i appen.

Första gången kommer appen visa de inställningar som gjorts i MEMOplanner. Därefter kan man göra lokala inställningar i appen, vilka inte synkroniseras med MEMOplanner.

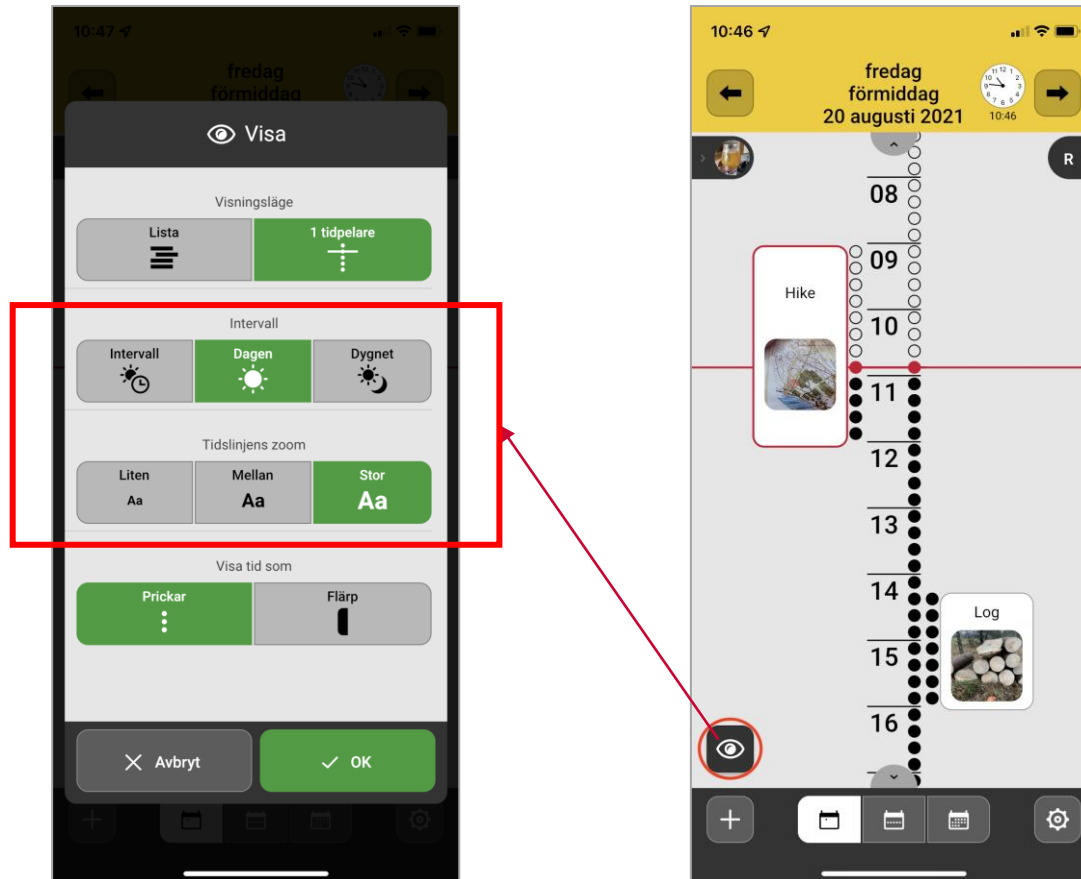

Varningar vid inläggning av aktivitet

Nu visas en varning om skapad aktivitet krockar med befintlig aktivitet eller om aktivitetens tid redan har passerat. (Samma som i MEMOplanner.)

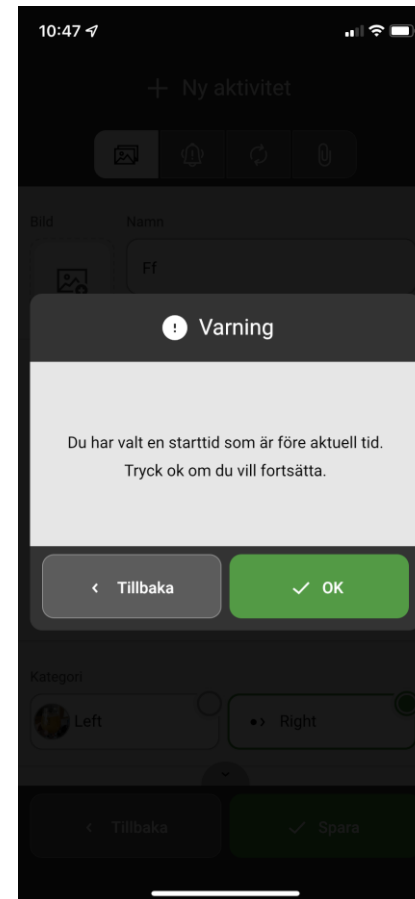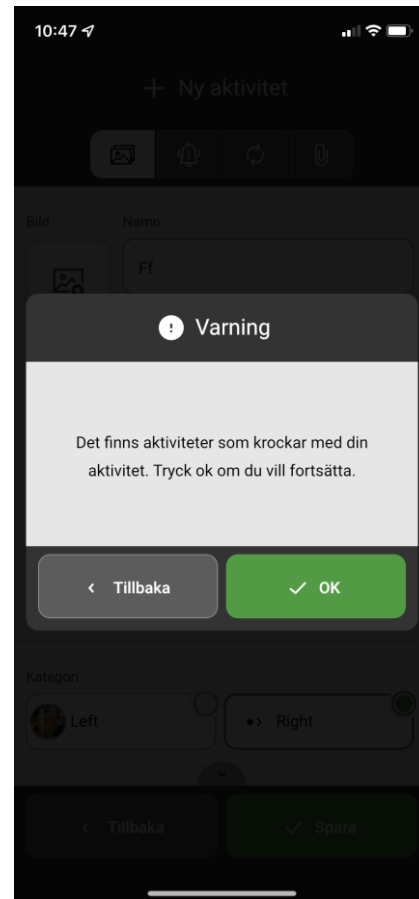

Anpassad vy för val av datum

När man ska välja datum för en aktivitet visas nu en anpassad vy för val av datum. (Samma som i MEMOplanner.)

